


# yuwell

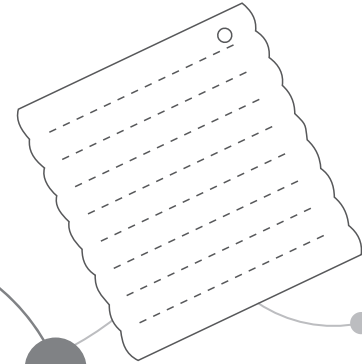

เบาะลมรุ่น สี่เหลี่ยม

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์



JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.  
Yunyang Industrial Park 212300 Danyang, Jiangsu  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
[www.yuwell.com](http://www.yuwell.com)

Ver.00




## คุณสมบัติ

- ▶ สามารถพกพาได้ น้ำหนักเบา กะทัดรัด ใช้งานง่าย การออกแบบเป็นคลื่นที่มีเอกลักษณ์ในการช่วยระบายอากาศ และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต
- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับคนทุกประเภทรวมถึงผู้ที่ต้องการการบำบัดพื้นฟู รวมถึงพนักงานที่นั่งทำงานในออฟฟิศเป็นระยะเวลานาน

## โครงสร้างของผลิตภัณฑ์

- ▶ รุ่น: สีเหลี่ยม

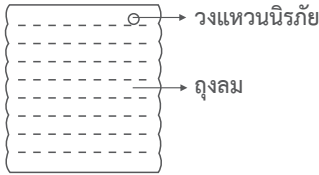

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ▶ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ รุ่น สีเหลี่ยม ผลิตจากวัสดุฟิล์ม Flocking หรือ เคลือบด้วยPVC
- ▶ รองรับน้ำหนัก: 100 กก.
- ▶ ขนาดหลังถูกขยาย

เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านนอก	เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้านใน	ความหนา
450 มม.	420 มม.	55 มม.

## ข้อบ่งใช้

- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสูบลมได้ โดยใช้เครื่องสูบลมแบบมือผ่านระบบนิรภัย
- ▶ ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องวางกึ่งกลางเก้าอี้ และจำกัดผู้ใช้งานเพียงคนเดียว

## วิธีการบำรุงรักษา และข้อควรระวัง

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
⚠	หากใช้งานไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือตัวบุคคลได้
ⓘ	ข้อควรปฏิบัติตาม
⊘	ข้อห้าม

- ⓘ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. ไม่ควรใช้เบาะรุ่นสีเหลี่ยม
- ⓘ ควรระวังเมื่อบีบลม เพื่อป้องกันเบาะลมแตก
- ⊘ ห้ามวางสัมผัสนกหรือสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันการแตก และรั่วของผลิตภัณฑ์
- ⓘ ควรรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์เสมอ สามารถใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลางในการทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ได้
- ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงสารกัดกร่อน และอัลคาไลน์
- ⚠ กรุณาเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ห่าง หลีกเลี่ยงบริเวณ
- ⓘ ขึ้น
- การทำลายทิ้ง ควรได้รับการจัดการตามระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความ
- ▶ คຸ້ມຮອຽງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຮູ້ໜາລາຍ

บริษัทของสงวนสิทธิ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์